



Schritt 1 (falls M-2443/M-2483 vorhanden)

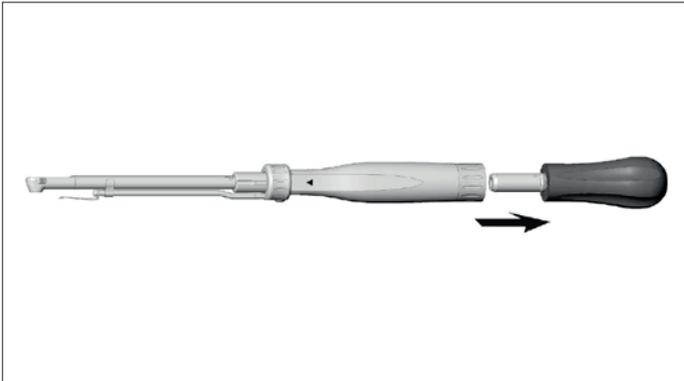


Handantrieb des Winkelschraubendrehers entfernen

Schritt 2 (falls M-2442 vorhanden)

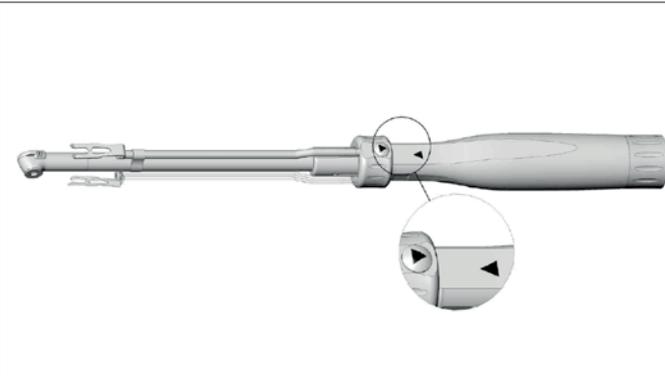


Schraubenhalterung in die Entriegelungsposition drehen

Schritt 3 (falls M-2442 vorhanden)

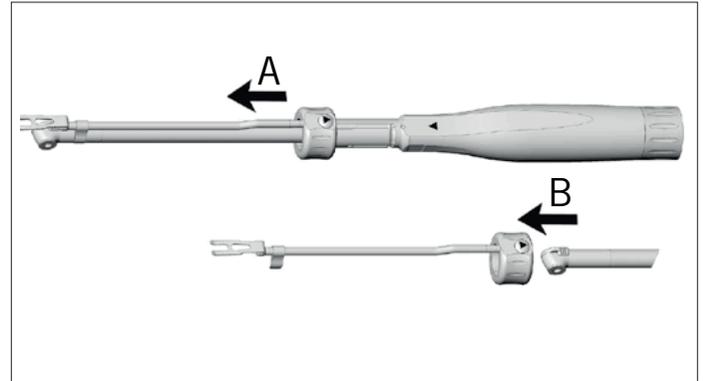


A Schraubenhalterung nach vorne schieben, bis der Clip sich löst
B Schraubenhalterung nach vorne abnehmen

Schritt 4

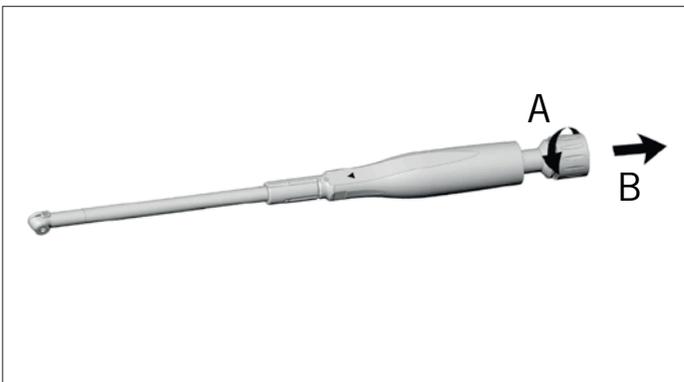


A Welle aufschrauben
B Welle aus der Griffhülse nehmen

Schritt 5

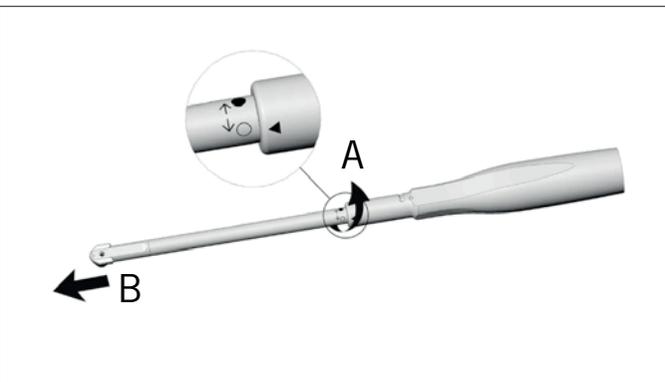


A Durch Drehbewegung von «●» nach «○» Kopfteil von der Griffhülse lösen
B Griffhülse von dem Kopfteil abziehen

Schritt 6

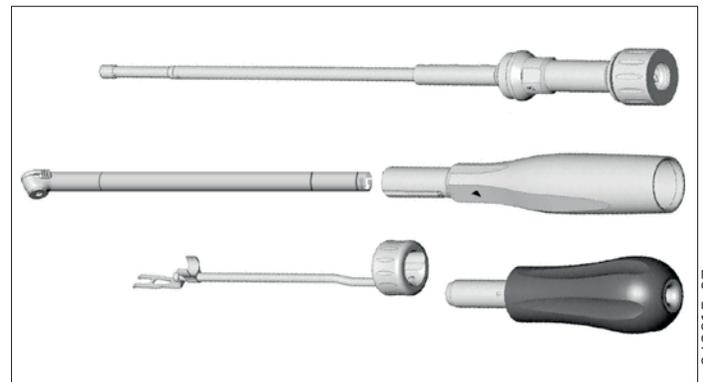


Desinfektion und Reinigung

Schritt 1 (falls M-2443 / M-2483 vorhanden)

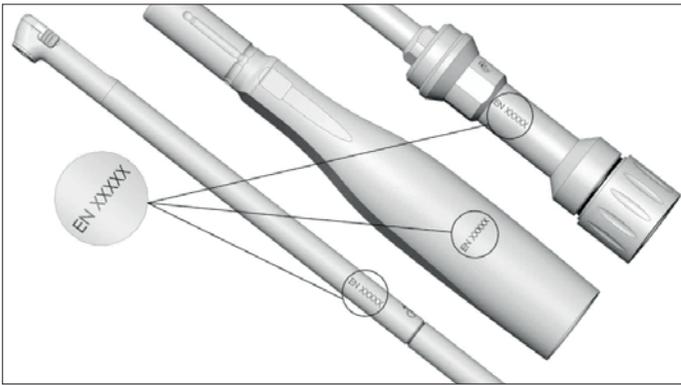


Übereinstimmung der EN-Nummern an der Griffhülse, am Kopfteil und an der Welle prüfen

Schritt 2 (falls M-2442 vorhanden)

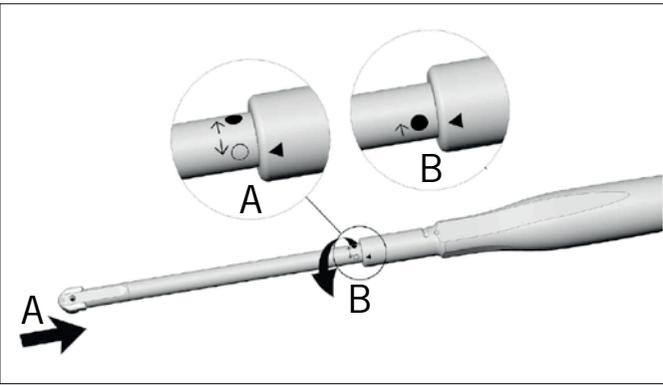


A. Kopfteil bis an den Anschlag in die Griffhülse stecken
B. Kopfteil von «O» in die Verriegelungsposition «●» drehen

Schritt 3 (falls M-2442 vorhanden)

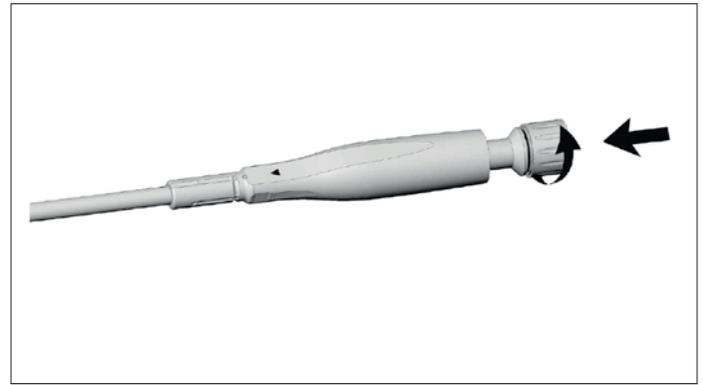


Welle in die Griffhülse schieben und diese festschrauben

Schritt 4

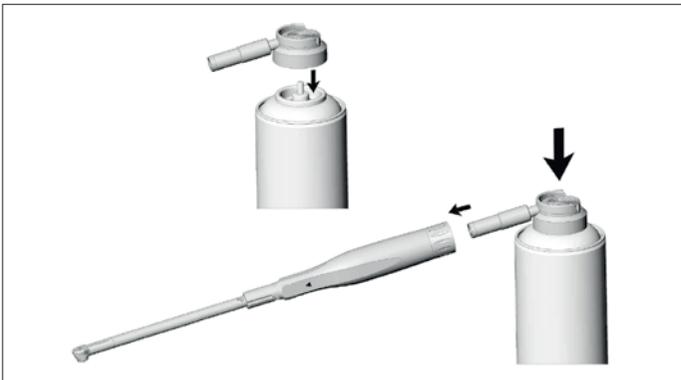


Ölpflege - Nach jeder Innenreinigung, vor jeder Sterilisation

Schritt 5 (falls M-2442 vorhanden)

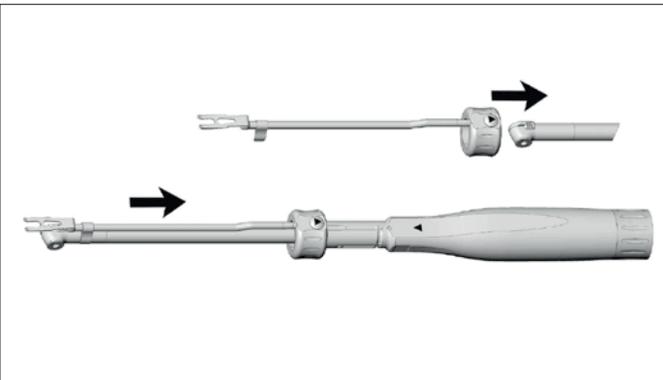

Schraubenhalterung bis zum hörbaren Einrasten aufschieben

Schritt 6 (falls M-2442 vorhanden)

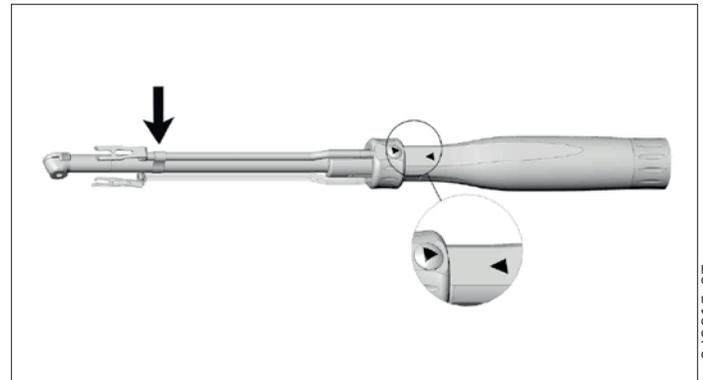

Auf die Positionierung achten und den Clip festdrücken